



# AirSim Child Combo X Manual de Usuario

Cod: 2024-0017

### Contenido

- Especificaciones del producto.
- Contenidos del paquete.
- Tamaños de equipo recomendados.
- Información de configuración inicial.
- Lista de trámites facilitados por el AirSim Advance Bronchi X.
- Cuidado y mantenimiento.
- Garantía.

### Especificaciones del producto

- Código de producto: CC10006X.
- Peso del AirSim Child Combo X: Aprox. 2,6 kilos.
- Peso total del envío: Aprox. 3 kilos.
- Dimensiones totales del envío: 40 x 24 x 22 cm.

### Contenidos del paquete

- 1 AirSim Child Combo X listo para usar (CC10006X)
- 1 estuche portaequipajes AirSim Child Combo X (CBAG03)
- Botella de lubricante de 100ml (TL001)
- 5 insertos de laringe (CNLX050: 1 suministrado con el maniquí y 4 de repuesto)
- 1 piel envolvente para el cuello (CRSN1005 – suministrada con el maniquí)

- 2 juegos de almohadillas adhesivas (se pueden acoplar a ventosas para mayor estabilidad si es necesario)

### Tamaños de equipo recomendados

- 4,5-5,0 mm DI para intubación nasal.
- 5,5-6,0 mm de diámetro interior para intubación oral.
- Talla 2 para mascarillas laríngeas LMA.
- Hoja de laringoscopio tamaño 2.
- Tamaños respectivos similares para otros dispositivos supraglóticos.

### Información de configuración inicial

- Retire con cuidado el modelo del estuche portaequipajes.
- Asegure el maniquí a una superficie adecuada ajustando el tornillo de las ventosas (la superficie debe ser no porosa para garantizar una succión suficiente)
- Opcional: Se proporcionan almohadillas adhesivas con el modelo para aumentar la estabilidad si es necesario. Esto es especialmente útil cuando el producto no se encuentra en una superficie ideal para que las ventosas sean efectivas. Simplemente retire la cubierta de la almohadilla para localizar el área adhesiva y fíjela a las ventosas.
- El cabezal se puede colocar en una posición neutra o de olfateo rotándolo, si es necesario para la laringoscopia directa.
- Compruebe que el volumen de aire en la lengua sea suficiente, se puede inflar o desinflar con una jeringa para ajustar la dificultad durante la intubación si se desea.
- Asegúrese de que dos bolsas pulmonares y una bolsa estomacal estén conectadas a las vías respiratorias y al esófago respectivamente.

- Rocíe cantidades generosas de lubricante proporcionado con el modelo (TL001) en las vías respiratorias y el equipo antes de su uso.

### Lista de trámites facilitados por el AirSim Baby X

- Cricotiroidotomía quirúrgica y con aguja.
- Traqueotomía percutánea.
- Doble intubación nasotraqueal.
- Técnicas de ventilación con máscara de válvula de bolsa (BVM).
- Gama completa de dispositivos supraglóticos.
- Laringoscopia directa.
- Inserción del tubo endotraqueal.
- Examen de fibra óptica despierto.
- Inserción de tubo combinado.
- Videolaringoscopia (incluida la maniobra de Sellick).
- Técnicas de inserción de sonda nasogástrica.

### Cuidado y mantenimiento

- Almacenar en condiciones limpias y secas, lejos del calor y la luz solar directa; Evite el contacto con metales, disolventes, aceites o grasas y detergentes fuertes. Cuando el producto no esté en uso, guárdelo en el estuche negro proporcionado.
- Lave minuciosamente las vías respiratorias del AirSim Baby X con agua tibia. Utilice agua tibia y jabón o algo similar hasta eliminar todos los residuos y materias extrañas visibles.
- Se pueden utilizar detergentes suaves o agentes de limpieza enzimáticos en las vías respiratorias de acuerdo con las instrucciones del fabricante y en la dilución adecuada. El detergente no debe contener irritantes para la piel o las mucosas.

### No utilice ninguno de los siguientes productos al limpiar la gama de productos AirSim.

- Germicidas, desinfectantes o agentes químicos como glutaraldehído (por ejemplo, Cidex®).
- Óxido de etileno, limpiadores a base de fenol o limpiadores que contienen yodo.

### En respuesta a la reciente pandemia de COVID-19, recomendamos este paso adicional para garantizar que el producto esté completamente desinfectado.

- Utilice alcohol en aerosol (mínimo 75%) y limpie. Repita esto de 3 a 4 veces para asegurarse de matar el virus por completo. Este método se puede utilizar tanto en la piel de silicona como en las vías respiratorias de látex.
- Se debe tener cuidado al retirar la unidad de una superficie si está pegada usando las almohadillas adhesivas para mayor estabilidad. Evite sacar la unidad de la superficie, afloje los tornillos de succión transparentes que se encuentran en la parte superior de la cabeza del maniquí e intente retirarlos suavemente deslizando un objeto plano debajo de las almohadillas adhesivas para evitar dañar las ventosas.

### Garantía

TruCorp garantiza que esta unidad está libre de defectos de materiales y mano de obra y que brindará un servicio satisfactorio por un periodo de 1 año a partir de la fecha de entrega.

Esto garantiza que nuestros clientes reciban la máxima cobertura en cada producto.

Si la unidad funciona mal, debe devolverse a la fábrica para su evaluación.

Tras el examen por parte de TruCorp, si se determina que la unidad está defectuosa, será reparada o remplazada sin cargo.

Además, TruCorp ofrece una garantía de 5 años para las vías respiratorias de la marca TruCorp en cualquier gama AirSim X, Trauma X y TruBaby X. La garantía de 5 años solo cubre las vías respiratorias reales de la marca TruCorp y ninguna otra parte del modelo.

TruCorp pagará el flete/entrega y las piezas reales necesarias sin cargo si alguna pieza del producto falla dentro del período de 1 año. TruCorp pagará el flete/entrega de la vía aérea de TruCorp sin cargo si la vía aérea falla dentro del período de 5 años.

Sin embargo, estas garantías quedan ANULADAS si; la unidad muestra evidencia de haber sido manipulada o muestra evidencia de haber sido dañada por calor excesivo, el uso de instrumentos afilados, mala aplicación, mal uso u otras condiciones operativas fuera del control de TruCorp. Los componentes que se desgasten o dañen por el mal uso no están garantizados y se cobrarán si se ha aprobado la reparación. La garantía quedará anulada si se considera que productos de terceros han dañado o causado fallas en los modelos TruCorp.

### Reemplazo de consumibles

El inserto laríngeo está diseñado para ser reemplazado por cada estudiante para proporcionar una experiencia de entrenamiento única. Este es un proceso muy rápido y fácil, perfecto para un ambiente de enseñanza ocupado.

1. Asegúrese de que la cabeza del maniquí esté colocada en una posición neutral.
2. Retire la piel envolvente del cuello para proporcionar acceso al inserto laríngeo.
3. Retire el inserto laríngeo y deseche:
4. Alinee un nuevo inserto en su posición y presione en su lugar. Asegúrese de que las crestas en todas las esquinas del inserto (áreas amarillas marcadas con un círculo a continuación) estén bien alineadas con el marco del inserto de laringe.

