



Manual de Usuario Brazo de Punción

Cod: 3001-0002

Acerca del producto

Este modelo es una representación realista del brazo izquierdo de un año. Está diseñado para el entrenamiento de la recolección de muestras de sangre arterial.

Instalación

1. Desempaque el modelo y colóquelo en una mesa plana con la altura adecuada.
2. Prepare la sangre simulada.
3. Consiga un soporte de infusión: ponga la sangre simulada o simplemente agua.
4. Conecte el vaso sanguíneo expuestos del brazo con la bolsa de agua y cierre la válvula.
5. Una vez conectado, abra la válvula de la bolsa de agua y el líquido llenará la arteria.
Cuando el líquido se desborde del otro vaso sanguíneo, cierre la válvula.
6. El modelo está listo para usar.

Almacenamiento

1. Revise todas sus partes y límpielas con agua y un detergente neutro.
2. Retire todo residuo de líquido que pueda quedar en las arterias.
3. Se recomienda almacenarlo en un ambiente fresco y ventilado sin luz solar directa.

Modo de uso

1. Apriete el bulbo para tocar el pulso radial y luego para localizar la arteria radial.
2. Extracción de sangre arterial según la técnica de punción estándar.
Apriete el bulbo, la presión arterial ejercerá y podrá realizar el procedimiento.

Precauciones y advertencias

1. Recolección de sangre arterial con la aguja de la jeringa no menor a 23G.
2. La arteriopunción es más fácil de filtrar que la venopunción, ya que la primera simula la presión arterial. Por lo tanto, se recomienda utilizar agua en lugar de sangre simulada durante la operación.

Cuidado y mantenimiento

1. El producto está hecho de material de alto polímero. Manténgalo alejado de pinturas, tintas, tintas de bolígrafo, disolventes orgánicos como alcohol etílico, etc.
2. Utilice detergente para eliminar las manchas y la suciedad.
3. Evite los desinfectantes de color como el yodo para prevenir las manchas y el envejecimiento del producto.
4. Almacene el producto en un lugar seco y ventilado y evite el calor, la luz solar directa, la lluvia y la humedad.