



Manual de usuario Simulador de Dilatación / Borramiento Cervical

Cod: 3001-0004



Producto importado y distribuido exclusivamente por Skill Training.
Avenida del Valle 932 Of. 205, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago.
Fono: +56 23 252 6600

Acerca del producto

Este producto está diseñado para facilitar la enseñanza, demostración y práctica del examen cervical antes del nacimiento. Muestra seis etapas diferentes del cuello uterino prenatal con tacto y tacto realistas.

Etapa I: Sin dilatación del orificio cervical, sin borramiento del canal cervical.

Etapa II: Dilatación de 2 cm, borramiento del 50 %.

Etapa III: Dilatación de 2 cm, borramiento total.

Etapa IV: Dilatación de 5 cm, borramiento completo.

Etapa V: Dilatación de 7 cm, borramiento completo.

Etapa VI: Dilatación de 9 cm, borramiento total.

Instalación

Saque el producto de la caja y colóquelo sobre una mesa plana. La altura de la mesa debe ser adecuada para el uso del modelo. Coloque el producto como con un paciente real.

Cómo utilizar

- Para prolongar la vida útil del producto, utilícelo como si fuera un paciente real.
- Realice un examen vaginal para evaluar la dilatación y el borramiento del cuello uterino.
- El modelo se puede utilizar para la formación, la evaluación y la autoevaluación. El letrero en la lateral muestra qué escenario simula.

Almacenamiento

- Limpie el simulador antes de guardar.
- Almacene el producto en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar.
- En lo posible almacene el producto en su caja original.

Precauciones y advertencias

- Limpiar el modelo con agua tibia jabonosa neutra.
- Las manchas de aceite se pueden eliminar con detergentes.
- Limpie las manchas con un paño húmedo.
- Recuerde siempre secar el producto.
- Retire resto de lubricante.

Mantenimiento y cuidado

- No utilice desinfectante o detergente de color para limpiar el producto.
- Evite el contacto con tinta, periódicos u otros materiales impresos que puedan dejar manchas en la superficie del modelo.
- Utilice guantes de procedimientos antes de cada procedimiento.
- Utilice lubricante antes de ocupar.

Características técnicas

Dimensiones: 84.5 x 18.5 x 13.5cm

Peso embalado: 4.5kg.