



Manual de Usuario Simulador de Cateterismo Masculino

Cod: 3001-0013

Introducción del producto

Estos modelos están diseñados para la educación, capacitación y evaluación de cateterismo masculino y femenino. Los productos cuentan con una sensación, tacto y tono de piel realistas.

El modelo femenino simula el pudendo, la vagina, la uretra, el perineo y la vejiga de forma realista. Líquidos visibles con cateterismo exitoso.

El modelo masculino simula el exterior, la uretra, el perineo y la vejiga de forma realista. Líquidos visibles con cateterismo exitoso.

Instalación y uso

Se sugiere que el rociador se use con entrenamiento a pequeña escala para el llenado de agua. Para entrenamiento a gran escala y de larga duración, utilice la bolsa de líquido.




1. ¿Cómo llenar agua con una bolsa de líquido?

A. Vierta la orina simulada en la bolsa de líquido con el interruptor de control apagado y luego cuelgue la bolsa de líquido en el soporte



Bolsa de líquido

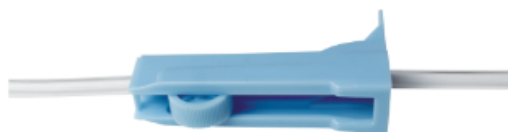

Interruptor de control apagado

B. Conecte el conector de la bolsa de fluido al puerto de la bolsa y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para conectarlo bien. Gire el interruptor giratorio al modo de cateterismo.



C. Encienda el regulador para comenzar a practicar el cateterismo.



Interruptor de control encendido

2. Se permite solo tamaños de Sonda Vesical 14Fr.

Aplique suficiente lubricante en el extremo frontal del catéter y simulador.
La orina simulada en realidad sale cuando se inserta el catéter en la vejiga.

Nota: Cuando la orina simulada en el rociador no sea suficiente, deje de llenar el modelo para evitar la entrada de aire. Si entra aire, elimine el aire y la orina simulada dentro del modelo y luego vuelva a llenar el rociador con orina simulada antes de la operación.

Cuidado y mantenimiento

- Utilizar lubricante antes de cada procedimiento.
- No utilice lápiz pasta cerca del producto.
- Retire todo resto de líquido.
- Cuando no se utilice el modelo, retire el módulo de genitales y el líquido residual, límpielo con un paño suave, envuélvalo en un paño de plástico y colóquelo en el estuche.

Almacenamiento

- Almacene el simulador limpio.
- Almacene el Simulador en su caja o bolsa original.
- Almacene el simulador en un lugar sin humedad y sin luz directa.