



# Manual de Usuario Simulador de Cateterismo Femenino


Cod: 3001-0014

### Introducción del producto

El modelo femenino simula el pudendo, la vagina, la uretra, el perineo y la vejiga de forma realista. Líquidos visibles con cateterismo exitoso.

### Instalación y uso

Se sugiere que el rociador se use con entrenamiento a pequeña escala para el llenado de agua. Para entrenamiento a gran escala y de larga duración, utilice la bolsa de líquido.

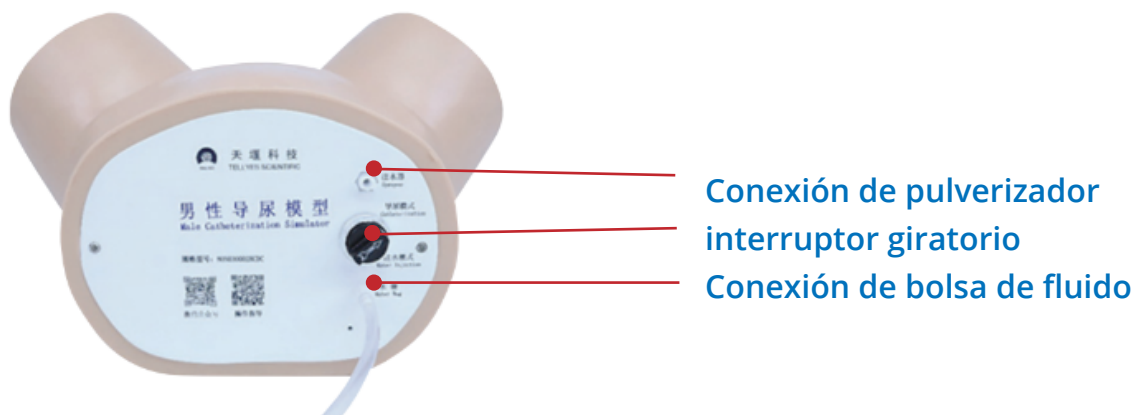

### 1. ¿Cómo llenar agua con una bol

A. Vierta la orina simulada en la bolsa de líquido con el interruptor de control apagado y luego cuelgue la bolsa de líquido en el soporte



**Bolsa de líquido**



**Interruptor de control apagado**

B. Conecte el conector de la bolsa de fluido al puerto de la bolsa y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para conectarlo bien. Gire el interruptor giratorio al modo de cateterismo.



C. Encienda el regulador para comenzar a practicar el cateterismo.



**Interruptor de control encendido**

### 2. Se permite solo tamaños de Sonda Vesical 14Fr.

Aplique suficiente lubricante en el extremo frontal del catéter. La orina simulada en realidad sale cuando se inserta el catéter en la vejiga.

**Nota:** Si entra aire, elimine el aire y la orina simulada dentro del modelo y luego vuelva a llenar el rociador con orina simulada antes de la operación.

### Cuidado y mantenimiento

- Utilizar lubricante antes de cada procedimiento.
- No utilice lápiz pasta cerca del producto.
- Retire todo resto de líquido.
- Cuando no se utilice el modelo, retire el módulo de genitales y el líquido residual, límpielo con un paño suave, envuélvalo en un paño de plástico y colóquelo en el estuche.

### Almacenamiento

- Almacene el simulador limpio.
- Almacene el Simulador en su caja o bolsa original.
- Almacene el simulador en un lugar sin humedad y sin luz directa.