



Simulador Cuidados Básicos en el Recién Nacido Masculino

Cod: 3001-0017



Producto importado y distribuido exclusivamente por Skill Training.
Avenida del Valle 932 Of. 205, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago.
Fono: +56 23 252 6600

Acerca de este simulador


Este simulador es un paciente infantil de tres a seis meses. Con 6 modos para diferentes objetivos de atención, está diseñado para que enfermeras, médicos pediátricos y nuevos padres practiquen y dominen todas las técnicas y habilidades del cuidado rutinario del bebé.

Instrucciones para la instalación

1. Saque el simulador de la caja de embalaje y colóquelo sobre un escritorio nivelado a la altura adecuada
2. Está listo para usar

Instrucciones de uso

1. Botón de inicio/parada: presione el botón de inicio en la mano izquierda del bebé, el bebé balbuceará. Pulse de nuevo, el simulador se apagará.
2. Seis modos: hambriento, sobrealimentado, húmedo, con fiebre, asustado y normal. El bebé puede cambiar de modo de uno a otro después de la operación correspondiente, como:

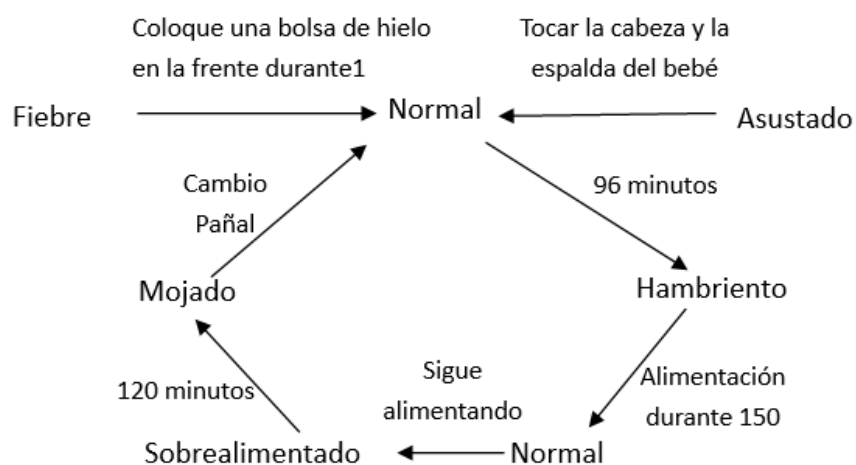

Como operar

- Alimentación: Coloque la tetina del biberón en la boca del bebé, hará un sonido de succión.
- Cambio de pañales : Sacar el pañal mojado y cambiar uno nuevo preparado para el bebé.
- Bolsa de hielo: coloque la bolsa de hielo en la frente del bebé durante aproximadamente 1 minuto.

3. Medición de signos vitales

- 1) Pulso: presione el botón de pulso en la mano izquierda del bebé durante 5 segundos, el resultado de la frecuencia del pulso se dará automáticamente.
- 2) Temperatura: inserte el termómetro en el ano con cuidado durante 10 segundos y sáquelo, el resultado se dará automáticamente.

4. Comunicación con el bebé

- 1) Modo normal: acaricie la cabeza del bebé, balbuceará; dale palmaditas en la espalda, se reirá; coloque la tetina del biberón en su boca, hará un sonido de succión.

2) Modo hambriento, mojado, con fiebre y asustado: en estos modos, el bebé llorará. El alumno debe analizar la causa e intentar que el bebé se calme. Las técnicas de atención de enfermería incluyen: alimentación, cambio de pañales, poner bolsa de hielo en la frente del bebé, acariciarlo y consolarlo.

- Modo hambriento: alimenta al bebé a tiempo. El bebé llorará al sacar el biberón de su mes si todavía tiene hambre. (La alimentación necesitará unos 150 segundos)
- Modo húmedo: reemplace el pañal a tiempo.
- Modo fiebre: la frecuencia del pulso y la temperatura seguirán aumentando. En este caso, coloque la bolsa de hielo en la frente del bebé durante aproximadamente 1 minuto y el bebé dejará de llorar. La frecuencia del pulso y la temperatura disminuirán gradualmente y volverán a la normalidad.
- Modo asustado: acaricia la cabeza y la espalda del bebé hasta que deje de llorar.

3) Modo sobrealimentado: si el bebé tuvo suficiente, el bebé dice "Estoy lleno" cuando lo amamanta y eructa mientras le da palmaditas o le acaricia la espalda.

Botón

- Botón de inicio/parada y botón de pulso: en la mano izquierda del bebé
- Botón de modo: en la mano derecha del bebé
- Batería: en la espalda del bebé

Notas:

- El simulador se apagará después de que el bebé balbucee durante 3 minutos para evitar el desperdicio innecesario de energía de la batería.
- Mientras se muestra el icono de batería baja en el botón de modo, debe reemplazar la batería.

Almacenamiento

Revisa todos sus accesorios y guárdalo en el estuche

Cuidado y mantenimiento

1. Trátelo como si fuera un bebé real durante el uso. No mueva las articulaciones violentamente. No se permite la práctica del baño.
2. No marque el modelo con bolígrafo, tinta, rotulador, etc. No utilice disolventes coloreados como el yodo para limpiarlo. No lo envuelva con materiales de impresión como periódicos, etc.
3. Utilice detergente neutro, agua limpia o un paño suave para limpiarlo después de su uso. Tenga cuidado de no dejar que el agua se filtre en la parte posterior de la batería y en las uniones.
4. Saque la batería del modelo y manténgala alejada de productos químicos, fuentes de radiación y luz solar directa cuando no esté en uso.

Especificaciones

1. Dimensiones: 620×100×230 mm
2. Peso: 1,6 kg