



# Brazo de Punción IV Pediátrico

Cod: 3001-0020



Producto importado y distribuido exclusivamente por Skill Training.  
Avenida del Valle 932 Of. 205, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago.  
Fono: +56 23 252 6600

### Acerca del producto

El brazo de entrenamiento inyección IV es de tamaño natural, anatómicamente correcto y representa un brazo de paciente pediátrico.

Fabricado con materiales de calidad, así como la fácil sustitución de sus partes, este modelo ofrece una prolongada vida útil.

### Instrucciones de uso

1. Conecte una de las mangueras del dispositivo a una matriz de suero o sangre simulada.
2. Permita que el líquido fluya por el sistema hasta la salida por el otro extremo del circuito.
3. Regule el flujo a través de la compresión de la manguera de salida.
4. El simulador está listo para su uso.

**Nota:** Para prolongar la vida útil del simulador, se recomienda el uso de agujas o branulas calibre 23G, 24G o mayor.

### Sustitución de la piel y las venas

Qué hacer cuando se produce una filtración excesiva en los sitios de punción, reemplace el set de venas y / o piel.

### Reemplazo de la piel

Cortar la piel y eliminarla. Esto se puede hacer con un cuchillo afilado o un bisturí. Cuando termine, deseche la piel.

### Fijar las venas

Colocar las nuevas venas en las ranuras del brazo al lado de la ranura del mandril. Deje suficiente espacio para que las venas sobresalgan a ambos lados del simulador.

### Fijar la piel

- a. Lave el interior de la piel del brazo con agua y jabón.
- b. Deslice la piel del brazo sobre el brazo y los dedos.
- c. Enjuague el exceso de jabón y deje secar.

### Cuidado y mantención

- a. La superficie se limpia con un jabón suave y agua tibia. NO limpie el simulador con solventes o materiales corrosivos, ya que lo dañarán.
- b. Nunca coloque el simulador en cualquier tipo de papel o de plástico impreso. Estos materiales, así como los bolígrafos, transferirán manchas indelebles sobre la piel.
- c. Guarde el simulador en lugar libre de humedad y sin exponer a luz solar.
- d. Lubricar sitio de punción antes de realizar el procedimiento.
- e. Nunca utilice agujas o branulas menores a 22G.
- f. Para la preparación de sangre simulada, utilice la recomendada por el proveedor.