



# Entrenador de Pie Diabético

Cod: 3001-0027

### Acerca de este simulador

1. El modelo simula los cambios patológicos del pie causados por la diabetes. Los alumnos pueden realizar enfermería con este modelo.
2. Este entrenador demuestra síntomas como la puebra, la piosis del pie causada por la diabetes, por lo tanto es un modelo ideal para la demostración de los cuidados básicos de enfermería del pie diabético.
3. Demuestra los síntomas de cinco etapas del pie diabético, que incluyen: úlcera superficial, úlcera profunda, infección, edema, caries y necrosis.
4. Los tres primeros dedos del modelo demuestran la patología traumática invasiva grave del pie con patología nerviosa.
5. El cuarto y quinto dedo del pie del modelo son tanatosis.
6. El modelo es realista, duradero y los dedos de los pies son flexibles.

### Instrucciones

1. Desempaque y coloque el modelo en una mesa plana para la enseñanza y el aprendizaje de los síntomas del pie diabético en diferentes etapas.
2. Después de cada uso, limpie el modelo y vuelva a colocarlo en el paquete.

### Mantenimiento y cuidado

1. Lave la superficie del modelo con espuma de jabón neutro y agua tibia.
2. No use desinfectante o detergente de color en el modelo y manténgalo alejado de periódicos o cualquier cosa con tinta o pinturas, o el color del modelo cambiará.
3. Para garantizar el tiempo de servicio del modelo, límpielo y realice un examen regular después de cada uso.
4. Cuando el modelo no esté en uso, empáquelo y guárdelo en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz solar directa.