



Modelo Cateterismo Femenino con Base

Cod: 3001-0034



Producto importado y distribuido exclusivamente por Skill Training.
Avenida del Valle 932 Of. 205, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago.
Fono: +56 23 252 6600

Acerca de este simulador

Se puede utilizar para simular un entrenamiento de operación de cateterismo uretral real. Los genitales externos son realistas. Se puede utilizar para realizar un cateterismo uretral real y una operación de cuidado de la vulva.

Función del producto

Fijado por soporte, se puede operar sobre la mesa.
Adecuado para un grupo de 2 aprendices.

Mantenimiento

Después de completar la operación de entrenamiento, el líquido residual debe vaciarse y limpiarse y el modelo debe limpiarse y almacenarse en un lugar seco.

Eliminación de problemas

Al cambiar el órgano genital externo, debe hacer que el tubo de goma en la vía úrica no tenga obstáculos y no pueda doblarse y bloquearse, de lo contrario, la orina no puede salir.

Use lubricantes cuando sea difícil insertar un catéter.