



# Inserción y Extracción de DIU Modelo 1 Modelo Anatómico con Base

Cod: 3001-0042

### Acerca de este simulador

Este modelo muestra con precisión el útero, el ovario y las trompas de Falopio. La cubierta de plástico transparente permite la visualización de la inserción y colocación del DIU. Es compatible con cualquier DIU regular, para que los usuarios entrenen y observen.

### Instalación

1. Saque el modelo de la caja y colóquelo sobre un escritorio plano con la altura adecuada.
2. El modelo está listo para usar.




### Almacenamiento

1. Retire el DIU del modelo.
2. Verifique todos los componentes y vuelva a colocar el modelo en la caja.

### Cuidado y mantenimiento

1. Limpie el modelo con un limpiador neutro, jabón o agua después de cada uso.
2. Manténgalo alejado de bolígrafos, tinta o rotuladores para evitar dejar rastros.

3. No lo envuelva en papel periódico.
4. No utilice yodo en el modelo.
5. Guarde el producto en un lugar seco y fresco cuando no lo use.

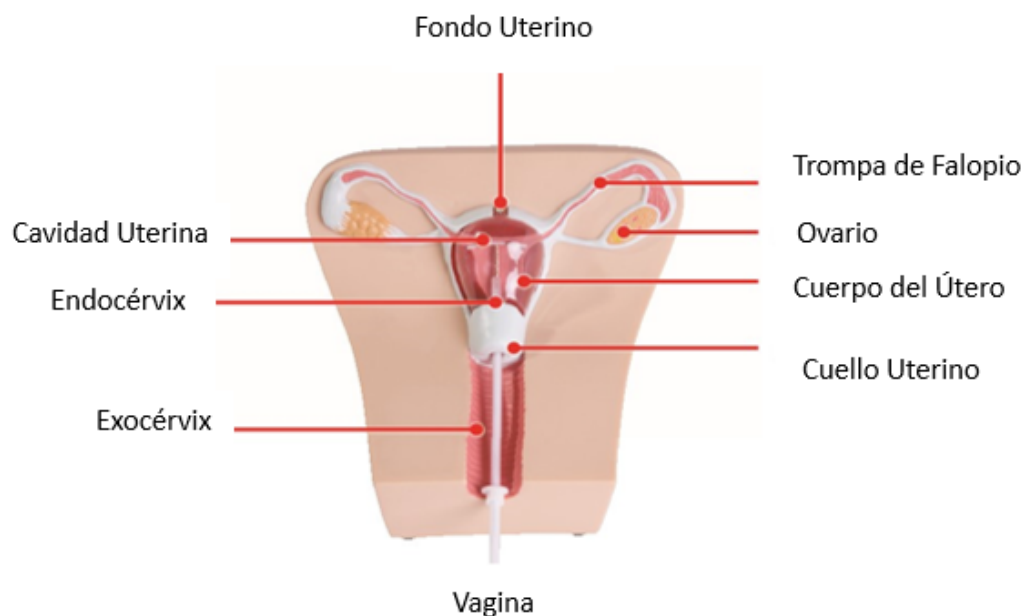

### Características técnicas

- Peso embalado: 0.55 kg.
- Dimensiones: 26.5 X 13 X 20.5cm.

### Componentes

- 1X Inserción y Extracción de DIU Modelo 1- Modelo Anatómico con Base.
- 1X DIU.
- 1X Manual de usuario.