



Entrenador de Inyección Multiusos (IM - IV) - Brazo Adulto

Cod: 3001-0046

Acerca de este simulador

El simulador All - Purpose IV Training Arm es una herramienta de entrenamiento muy útil. Al proporcionar una experiencia realista para la práctica de diversas técnicas de inyección y punción, permite a los profesionales de la salud adquirir habilidades y mejorar su destreza antes de realizar estos procedimientos en pacientes reales.

La posibilidad de simular inyecciones intramusculares, venopunciones, muestreo y transfusiones, así como la inyección intradérmica en el antebrazo, brinda una amplia gama de opciones de entrenamiento.

La capacidad de reemplazar la piel, los vasos y los módulos de inyección del simulador permite mantenerlo en buen estado y prolongar su vida útil.

Habilidades adquiridas

- Venopunción.
- Identificación del lugar de punción a través de la palpación de las venas.
- Infusión IV.
- Inyección muscular deltoides.
- Inyección intradérmica.



Características

- Realismo de apariencia y textura para una práctica realista.

Características clave:

1. Se puede sentir un “pop” realista cuando la aguja penetra en las venas.
2. Sistema vascular en el brazo y red vascular en el dorso de la mano.
3. La inserción adecuada producirá reflujo de sangre y la aguja se puede fijar con cinta médica.
4. Su sistema venoso incluye ocho vasos sanguíneos con estructuras anatómicas correctas.
5. Los dedos se pueden doblar como los reales.
6. Se pueden realizar inyecciones en el músculo deltoides e intradérmica.

Cuidados y mantención

- A. La superficie normal se limpia con un jabón suave neutro y agua tibia.
NO limpie el simulador con solventes o materiales corrosivos, ya que lo dañarán.
- B. **Nunca** coloque el simulador en cualquier tipo de papel o de plástico impreso. Estos materiales, así como los bolígrafos, transferirán manchas indelebles sobre la piel.
- C. Guarde el simulador en lugar libre de humedad y sin exponer a luz solar.
- D. **Nunca** utilice agujas o branulas menores a 22G.