



Modelo de Cateterismo Femenino Transparente

Cod: 3001-0053

Acerca de este simulador

Este modelo transparente permite observar la estructura pélvica anatómica y practicar la inserción adecuada.

Los alumnos pueden experimentar resistencia y presión reales como lo harían con un paciente real.

Instalación


Saque el producto de su estuche, comprobar si los componentes y accesorios están listos para su uso, incluido el catéter, el depósito de líquido y el lubricante.

1. Llene el depósito con la cantidad adecuada de agua (orina simulada), cierre la abrazadera.

2. Junte la conexión en el tubo del depósito de agua - 11×7,5 mm.

3. Hay dos tubos de PVC expuestos (simulan el uréter) fuera del modelo, uno es relativamente más largo que otro.

4. Conecte el tubo más corto con la junta de conexión de 7,5 * 4 mm.

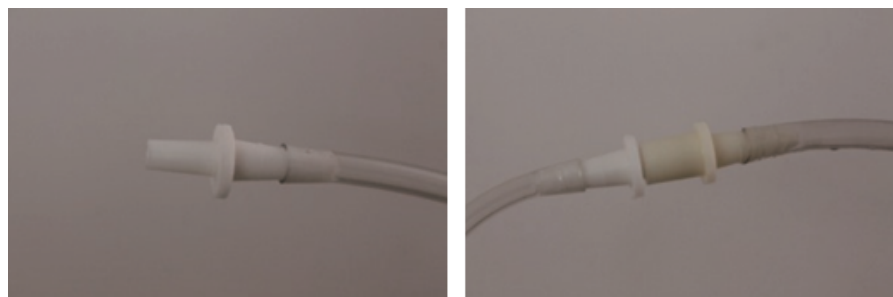

5. Levante el tubo más largo con la mano, a una altura más alta que el nivel de líquido dentro del depósito. Abra la abrazadera y deje que el agua fluya hacia la vejiga. El nivel del agua dentro del tubo aumentará después de que la vejiga se llene de agua.

6. Cierre el tubo y colóquelo correctamente, en caso de que el líquido se vaya;

7. El modelo ya está listo para su uso.

Instrucción

1. Use el catéter 14 # y aplique la cantidad adecuada de lubricante sobre él. Inserte el catéter de acuerdo con los procedimientos estándar, se puede ver orina simulada una vez que se inserta el catéter.
2. Las habilidades y técnicas de inserción se pueden practicar mediante el uso de un catéter de doble luz para que se pueda fijar el catéter permanente.
3. El cateterismo, el catéter permanente y la irrigación de la vejiga se pueden realizar utilizando el modelo.
4. El depósito de líquido externo proporciona una cantidad suficiente de orina simulada, lo cual es conveniente para que el maestro lo demuestre y los estudiantes practiquen repetidamente.



Drene el agua interna de la vejiga

1. Prepare un plato u otros recipientes para el fluido, cierre la abrazadera del rodillo, separe el tubo corto del depósito de fluido y colóquelo en el recipiente.
2. Incline el modelo transparente hasta que el tubo más corto que se extiende desde la vejiga esté verticalmente hacia abajo.
3. Escurre el agua a través del tubo más corto.

Precauciones y advertencias

1. Los genitales no deben estar desconectados de la vejiga.
2. No intente separar el catéter de la vejiga.
3. Las partes transparentes del producto son pulibles. No golpee ni frote el producto, de lo contrario, el producto se dañará o manchará.
4. Limpie el producto con un paño suave.
5. No utilice alcohol o polvo de pulido en la superficie del modelo.
6. Drene el modelo por completo cuando no esté en uso.

Almacenamiento

1. Limpie el modelo después de cada procedimiento.
2. Cierre la abrazadera , retire el depósito de agua del conector y vierta el líquido en su interior.
3. Drene el exceso de agua dentro de la vejiga de los dos tubos del modelo.
4. Revise todos los componentes, seque el agua interna y guarde el producto en el estuche.

Mantenimiento y cuidado

1. El modelo está hecho de material polimérico, no utilice disolventes orgánicos como alcohol para limpiarlo y lavarlo.

Evite el contacto con tinta de impresión, tinta, pigmento, etc., que pueden manchar la superficie del modelo y acelerar el envejecimiento del material.

2. Las manchas en la superficie se pueden limpiar con jabón neutro.

3. Evite aplicar desinfectante de color como yodo en el modelo, o el pigmento manchará la superficie y acortará la vida útil del producto.

4. Guarde el producto en un lugar bien ventilado, seco y fresco cuando no esté en uso. Evite las altas temperaturas, la luz solar directa, la lluvia y la humedad.