



Simulador de Manejo de Ostomía

Cod: 3001-0056

Acerca de este simulador

Este simulador es ideal para la demostración y práctica de procedimientos de cuidado de ostomía.

Instalación

1. Coloque el producto sobre una mesa o escritorio plano con la altura adecuada para su funcionamiento.
2. El simulador ya está listo para su uso.

Instrucciones

1. Coloque el simulador en la posición adecuada.
2. Las heces simuladas se pueden inyectar a través del puerto de infusión en la parte posterior del producto.
3. Se puede practicar el reemplazo y la instalación de la bolsa de ostomía.
4. Se puede inyectar nutrición enteral simulada.
5. Cuidados postoperatorios de la ostomía: se pueden irrigar los estomas para limpiar la sonda.

Precauciones

1. Lubrique la piel alrededor de los estomas antes de la operación para reflejar mejor los procedimientos quirúrgicos.
2. No utilice lubricantes que contengan petróleo como la vaselina, ya que pueden acelerar el envejecimiento del material.

Mantenimiento y cuidado

1. Después de cada uso debe enjuagarse con agua tibia.
2. Los disolventes solubles pueden dañar el producto. El simulador no debe entrar en contacto con papel impreso o plásticos, ya que pueden dejar manchas en la superficie.
3. Evite aplicar bolígrafo en el simulador.
4. Las manchas difíciles se pueden limpiar aplicando jabón neutro, secar con un paño limpio.
5. Secar y escurrir el agua antes de guardarla.

Características Técnicas

Dimensiones: 46 x 33.5 x 45.5cm

Peso: 5kg