



Simulador de Parto Básico (Manual con 1 feto)

Cod: 3001-0062

Acerca de este simulador

El simulador de parto básico es una herramienta esencial en la formación y la preparación para el parto ya que brinda una experiencia práctica que ayuda a los profesionales de la salud.

Este manual solo ofrece orientación técnica general y este estimulador puede proporcionar una demostración general de la técnica obstétrica, que incluye:

- Palpación de cabeza, hombro, espalda, rodilla y codo para el feto.
- Parto vaginal normal.
- Cesárea clásica.
- Presentación podálica simple, presentación cefálica.
- Maniobra de Ritgen.

Este estimulador multipropósito ofrece una experiencia integral al simular diversos aspectos del parto, incluyendo la maniobra de Leopold y la dilatación cervical, adaptándose a diferentes patrones de parto. Su diseño versátil permite colocar al feto en cualquier posición, imitando así un parto real.

La pelvis de tamaño natural está meticulosamente etiquetada con marcadores anatómicos, mientras que la cavidad abdominal abierta permite retirar la cubierta blanda del estómago para una mayor claridad.

El canal de parto, de tamaño natural, junto con el pudendo y el perineo, hechos de materiales blandos y adaptables, pueden ajustarse según las necesidades específicas.

Este simulador proporciona al feto una serie de características realistas y táctiles, como la fontanela, cuencas oculares, nariz, boca, orejas y columna vertebral, permitiendo una práctica precisa y detallada.

Además, el feto está equipado con una vena umbilical simulada en azul, dos arterias umbilicales y placentas rojas que pueden separarse del cordón umbilical y adherirse a la pared abdominal interna con cinta adhesiva de nylon. La disposición variable de las placentas permite realizar diversas simulaciones.

Para una óptima experiencia de uso, se recomienda aplicar una generosa cantidad de polvos de talco en la cabeza y los hombros del feto, lo que puede facilitar el proceso de parto simulado y simplificar la limpieza posterior a la demostración.

Este estimulador ofrece una herramienta completa y efectiva para la formación y práctica de profesionales médicos en el manejo del parto y el cuidado neonatal.

Cuidado y mantenimiento

- Después de cada procedimiento necesita una limpieza cuidadosa con todos los polvos de talco limpios, para lo cual se puede usar solución jabonosa, así como agua, evitando la abrasión brusca. Y luego sécalo bien.
- Se debe evitar que este simulador sea tocado con bolígrafo, tinta o rotulador que puede dejar marcas que no se pueden eliminar. No se debe utilizar papel de periódico para empaquetar el simulador. Además, la tintura de yodo y las sustancias por igual no deben untarse en ella.
- El almacenamiento inadecuado dañará el simulador que debe colocarse en el estuche de transporte en el que o sobre el cual no se deben colocar objetos pesados.
- Guardar el simulador en un lugar libre de humedad sin exponer a la luz solar.