



# Simulador de Recién Nacido para el Cuidado Umbilical

Cod: 3001-0066

### Acerca de este simulador

El maniquí para el cuidado del cordón umbilical neonatal representa un avance excepcional en la práctica clínica del corte, pinzamiento y lactancia del cordón umbilical en recién nacidos. Este modelo presenta un diseño innovador y está meticulosamente elaborado para proporcionar una experiencia de aprendizaje realista y efectiva.

Con su estructura anatómicamente precisa, este maniquí simula a la perfección un neonato con cabeza, piernas y brazos articulados, ofreciendo una representación auténtica que facilita la práctica de procedimientos esenciales en el cuidado del cordón umbilical.

Fabricado con materiales de alta calidad, el maniquí garantiza durabilidad y realismo, brindando una sensación auténtica durante la simulación clínica.

El maniquí cuenta con una vena umbilical y dos arterias umbilicales, imitando de manera fidedigna la complejidad de la anatomía del cordón umbilical neonatal. Su cordón umbilical es lo suficientemente largo para permitir a los estudiantes realizar prácticas repetidas, y además, es fácilmente reemplazable, lo que prolonga la vida útil del maniquí.

### Función

Este maniquí va más allá de ser una herramienta educativa al permitir una práctica integral en diversas habilidades relacionadas con el cuidado neonatal.

No solo ofrece una representación auténtica del corte y pinzamiento del cordón umbilical en recién nacidos, sino que también brinda la oportunidad de adquirir destrezas en otras áreas cruciales del cuidado infantil.

### Instrucciones de funcionamiento

#### Ligadura de pinza de cordón umbilical

1. Saque el extremo libre del cordón umbilical para obtener la longitud adecuada; Ligarlo con pinza umbilical en el punto a dos centímetros de la raíz del cordón umbilical. Corte el cordón umbilical en el punto a 0,5 centímetros de la pinza umbilical y luego manipule la protuberancia.

2. Después de la práctica, saque el cordón umbilical y corte en la posición de ligadura para prepararse para la próxima práctica. Se puede seguir la instrucción anterior.

### Método de ligadura de hilo de algodón

1. Ligar el primer nudo con hilo de algodón a una posición de 0,5 centímetros de la raíz del cordón umbilical y ligar el segundo nudo a una posición de un centímetro de la raíz del cordón umbilical.

Cortar el cordón umbilical a una distancia de 0,5 centímetros del segundo nudo de ligadura. A continuación, ocúpate de la protuberancia.

2. Después de la práctica, saque parte del cordón umbilical y corte en el primer nudo de ligadura para prepararse para la próxima práctica. Se puede seguir la instrucción anterior.

### Montaje de maniqués

1. Saca el maniquí y el cordón umbilical.
2. Conecta un extremo del cordón umbilical con el ombligo y deja el otro extremo libre.
3. Reemplace el cordón umbilical como se indica en el paso 2.

### Notas

1. No dejar el simulador en contacto con cualquier papel de periódico.
2. Todos los componentes deben limpiarse y examinarse rutinariamente después de su uso para garantizar la vida útil del producto.
3. Almacene el simulador en un lugar libre de humedad y sin exponer a la luz solar.