



Simulador de Cuidado de Traqueotomía Adulto

Cod: 3001-0105

Acerca de este simulador

El simulador de atención de traqueotomía para la educación del paciente representa una herramienta integral y efectiva diseñada para enseñar a pacientes y cuidadores las habilidades esenciales necesarias para brindar cuidados domiciliarios de manera segura y competente.

Este maniquí adulto abarca diversas estructuras anatómicas cruciales, incluyendo fosas orales y nasales, faringe, epiglotis, tráquea, esófago y el sitio de la traqueotomía.

Procedimientos que se pueden realizar en el simulador

- Aspiración oral-faríngea.
- Aspiración traqueal nasal.
- Aspiración traqueal mediante traqueotomía.
- Limpieza del estoma.
- Cambio de tubo de traqueotomía.
- Inflado del manguito.
- Cambio de ligaduras de traqueotomía.

Anatomía presente en el simulador:

- Pasajes orales.
- Fosas nasales.
- Faringe.
- Epiglotis.

- Tráquea
- Esófago.
- Estoma.
- Bronquios derecho e izquierdo.

El simulador se puede utilizar en todos los métodos de atención de la traqueotomía. Los métodos y procedimientos individuales pueden diferir; Por lo tanto, este folleto no se propone esbozar un procedimiento particular a seguir. Más bien, se recomienda que se siga un manual de procedimiento y las instrucciones del instructor.

Esto eliminará la confusión y servirá mejor al instructor y al plan de estudios individuales.

Cuidado el simulador:

La suciedad superficial normal se puede eliminar con un jabón suave, agua tibia y seque con paño limpio.

Precauciones

1. No manipule el simulador con papel o plástico impreso. Estos materiales, así como los bolígrafos, transferirán manchas indelebles. No use ningún cosmético en el simulador.
2. Con el uso repetido, el catéter de succión se volverá blando y flexible, lo que dificultará su inserción.
3. Lubrique el simulador y la sonda antes de realizar el procedimiento.
4. Almacenar en lugar sin humedad, sin contacto al sol.