



Simulador de Examen Ginecológico con Patologías

Cod: 3001-0128

Acerca de este simulador

Este modelo realista simula una parte inferior del cuerpo femenino, que incluye abdomen y cuenca. Está especialmente diseñado para practicar el examen ginecológico.

La piel está hecha de material de alta tecnología y tiene una sensación real.

Procedimiento de practica

1. Examen bimanual y examen rectal-vaginal.
2. Análisis de cérvix normal y anormal.
3. Exploración con colposcopia.
4. Colocación y retiro de DIU.
5. Exploración laparoscópica.
6. Ligadura del oviducto.
7. Aspiración de vacío manual (AVM)

Contenido

1. Simulador.
2. Útero ante vertido normal.
3. Útero retrovertido normal.


Esqueleto



4. Útero 7-9 semanal.
5. Útero 10-12 semanas.
6. Útero 20 semanas.
7. Cérvix normal.
8. Cérvix patología.
9. Soporte metálico.
10. Especulo.
11. Manual de instrucciones.

* Retire la piel exterior para exponer el esqueleto interior y el cojín esponjoso.

Cojín de Esponja

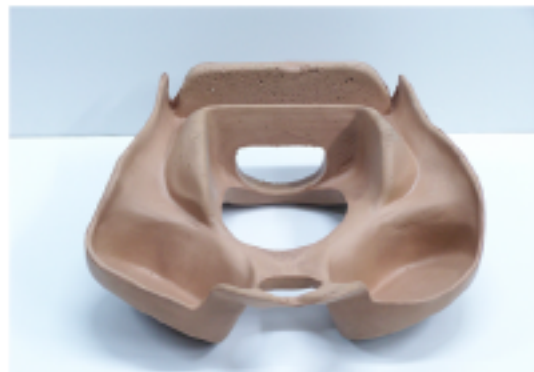


Abertura Superior



Útero


Instale el útero transparente, que es útil para observar la colocación de la DIU y detectar el útero, en el simulador. Los tubos que incluyen oviducto, ligamento ovárico y ligamento redondo pueden reemplazarse.

Cérvix y úteros

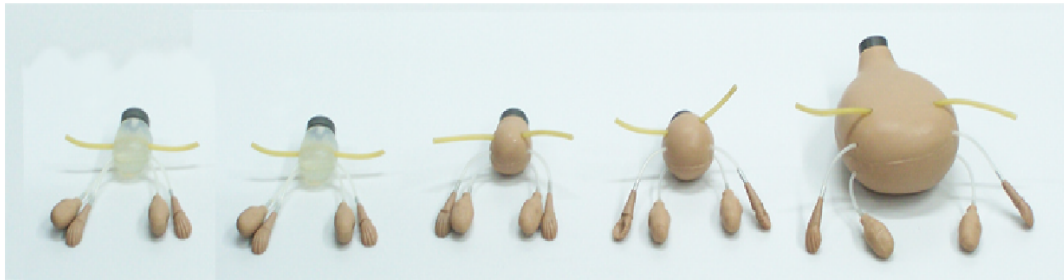

Proporcionar múltiples cervices y úteros para practicar. De izquierda a derecha: útero antevertido normal, útero retrovertido normal, útero de 7-9 semanas, útero de 10-12 semanas y útero de 20 semanas.

Cérvix normal y patología

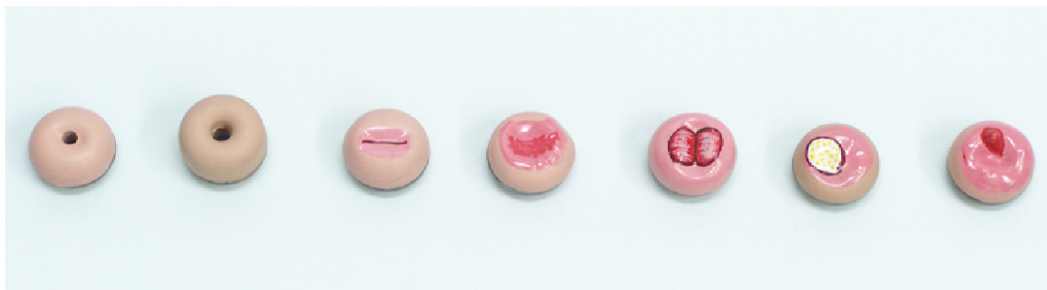

Reemplace los cérvix y úteros a través de la abertura



Una mano sujeta el útero y la otra inserta el cuello uterino para conectarlas. Gire el cuello uterino para unir con el útero.

Cómo usar


1. Uso de Especulo.



Antes de utilizar el espéculo, aplique el lubricante. Insértelo en la vagina, ajuste el ángulo y luego ábralo.

El grado de apertura se puede ajustar con el botón del instrumento.

2. Examinación Bimanual.
3. Examen Rectal-Vaginal.

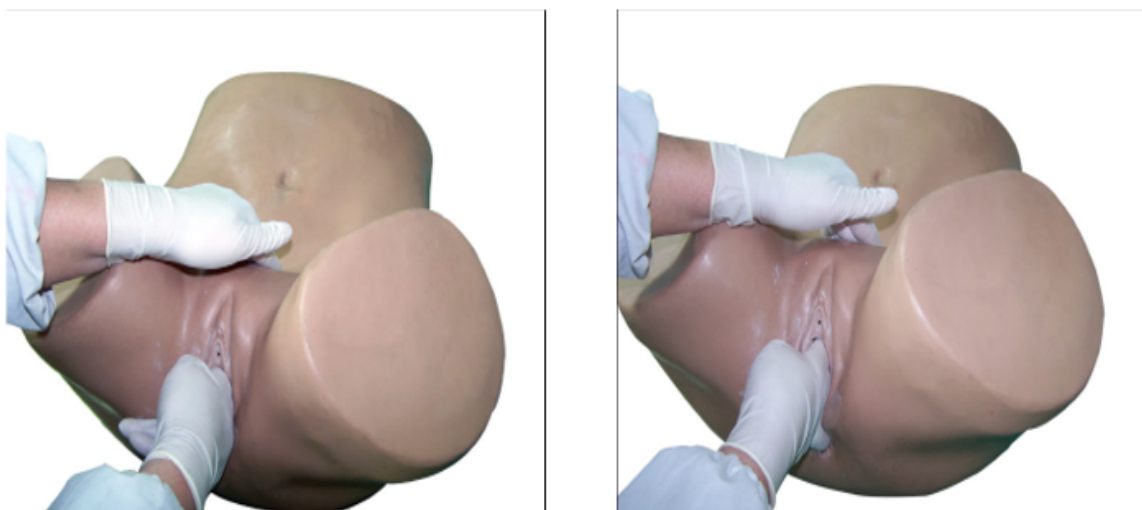

Cuidado y mantenimiento

1. El simulador está construido de material que se acerca a la textura de la piel.
2. Use lubricante como silicona a base de agua durante la práctica y use los guantes en el examen pélvico.
3. Después del uso, limpie el modelo, eliminando todos los rastros de cualquier lubricante.
4. El simulador se limpiará con jabón suave y agua.

5. Quitar las manchas con detergente y paño suave.
6. No limpiar con abrasivos duros.
7. Secar bien y usar talco.
8. El cuidado adecuado y el mantenimiento alargan la vida útil.
9. Almacene el simulador cuando no lo use.
10. Prohibido el contacto con el bolígrafo, la tinta y puede dejar marcas indelebles.
11. Evita envolver el simulador con los periódicos.
12. No use la solución de povidona yodada en el simulador.