



Simulador Transparente de Dilatación y Legrado (Horizonte)

Cod: 3001-0132

Acerca de este simulador

Aspecto transparente con anatomía interna para la demostración de dilatación y legrado, colocación y extracción del DIU, así como cateterismo e irrigación de la vejiga, etc.

Preparación

1. Saque el modelo y todos los componentes de la caja de embalaje.
 2. Prepare el apoyo a la infusión.
 3. Llene la vejiga simulada con agua.
- 1 Coloque un clip en el tubo del líquido embalse. Llene el depósito de líquido con agua clara (orina simulada) después del cierre el clip y cuélgalo en la infusión soporte (figura 1).



Figura 1

- 2 Conecte un tubo transparente extendido desde el modelo y el tubo de depósito de fluido con conector (figura 2).



Figura 2

- 3 Levante el otro tubo transparente extendido desde el modelo con una mano para hacerlo ligeramente por encima del nivel del agua del fluido embalse. Abra el clip para llenar la vejiga simulada y selle el tubo y colóquelo correctamente para evitar fugas.
- 4. Use un espéculo para expandir la vagina y coloque la parte del útero en la cavidad uterina con pinzas.
- 5. Extienda la alfombrilla antideslizante después de realizar los procedimientos anteriores y El modelo está listo para su uso.

Mantenimiento y cuidado

1. Sin uso de disolventes orgánicos. Evite el contacto con tinta de impresión, tinta, materiales impresos por miedo a las manchas y al desgaste.
 2. Evite los desinfectantes de color como el yodo por temor a las manchas de tinte y desgaste.
 3. Drene toda el agua interna después de su uso, limpie con un paño suave y Almacenar en una caja de embalaje.
- Almacene el producto en un lugar bien ventilado, seco y lugar fresco.
 - Evite las altas temperaturas, la luz solar, la lluvia y la humedad medio ambiente.