



# Entrenador de Manejo de Vía Aérea Adulto

Cod: 3001-0158

### Acerca de este simulador

Este producto es para el manejo de las vías respiratorias adultas con estructuras anatómicas correctas.

Presentado con una sensación realista el tacto y la apariencia de una cabeza adulta es una buena opción para que los estudiantes e instructores aprendan y enseñen intubación traqueal y ventilación También puede simular el pulso carotideo.

### Lista de componentes

1. Capacitador en Manejo de Vías Respiratorias.
2. Pulmones simulados izquierdo y derecho.
3. Estómago simulado.

### Construir

El entrenador de manejo de las vías respiratorias está listo para usar en el momento de la entrega.

Simplemente retírelo de la caja y desenvuelva el material de embalaje. Las bolsas pulmonares y estomacales ya están colocadas y listas para usar.

### Lubricación

Antes de usar el entrenador de manejo de las vías respiratorias, lubrique tanto el simulador como los suministros que se están utilizando con el lubricante IT proporcionado.

**Tenga en cuenta:** Se recomienda el uso del lubricante provisto o un lubricante vegetal similar para el entrenador de manejo de las vías respiratorias. El uso de un lubricante a base de silicona puede causar daños al simulador, anulando así la garantía del entrenador.

### Extracción de la cabeza del soporte

Para retirar la cabeza del soporte, primero se deben quitar los pulmones y la bolsa del estómago.

A continuación, gire la cabeza ligeramente hacia un lado para alinear los chaveteros con las ranuras y tire de la cabeza del soporte. Para volver a montar la cabeza en el soporte, simplemente invierta este procedimiento.

### Fijación de la cabeza al maniquí

Primero debe quitar las bolsas de los pulmones y el estómago si están unidas al entrenador. A continuación, gira la cabeza boca abajo y comienza a insertarla en los hombros. Inclina la cabeza ligeramente hacia arriba hasta que las dos ranuras en la parte posterior del cuello se deslicen debajo del anillo y en la parte superior del torso.

Ahora haga coincidir la única ranura en la parte delantera del cuello con la ranura en la parte posterior del torso y empuje la cabeza hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Gire la cabeza hacia atrás para que quede hacia arriba y en la posición correcta.

### Conexión de las vías respiratorias

Una vez que la cabeza esté en su lugar, conecte la bolsa pulmonar al bronquio derecho deslizando el tapón de la tapa sobre el adaptador blanco en el bronquio.

A continuación, utilice los tapones rojos suministrados para taponar el esófago y el bronquio izquierdo. Esto asegurará que el sistema esté sellado y operativo. Para retirar la cabeza del maniquí, invierta el procedimiento de fijación.

### Limpieza y mantenimiento

Para limpiar el entrenador de manejo de las vías respiratorias, primero deberá quitar la cabeza del soporte. A continuación, lleve el entrenador a un área con un fregadero y un espacio abierto en el mostrador. Estabilice la cabeza en el mostrador boca arriba (las toallas funcionan bien para esto) con los tubos tapados colgando sobre el fregadero. Vierta con cuidado agua tibia y jabón neutro en la boca hasta que el nivel del agua llegue a la mitad de la lengua.

Ahora incline la cabeza hacia atrás y levante el cuello 3" de la encimera. Continúe llenando hasta que el nivel del agua cubra la lengua. En este punto, tome un cepillo pequeño y suave y frote suavemente el interior de la boca (un cepillo de dientes pequeño funciona bien para esto).

Se pueden usar hisopos de algodón para frotar el interior de las fosas nasales. Cuando termine, retire el tapón del esófago y drene el agua en el fregadero. Ahora levante el cabezal a una posición vertical y tire de los tapones de la tráquea para vaciar completamente el sistema.

### Enjuague de las vías respiratorias

Para enjuagar las vías respiratorias, siga el mismo procedimiento con agua limpia y tibia del grifo. Repita este proceso hasta que todo el jabón se haya eliminado del sistema.

Escurre como se describió anteriormente y repite el proceso de enjuague para eliminar toda la solución de lejía. Deje la cabeza a un lado y deje que se seque por completo.

### Limpieza de la cara

La suciedad normal se puede eliminar de la cara del entrenador con agua y jabón neutro. **Nota:** No use limpiador alrededor de la boca y las fosas nasales, ya que los residuos del limpiador podrían ser tóxicos.

### Precaución

Nunca coloque sobre el simulador ningún tipo de papel o plástico impreso. Estos materiales transferirán manchas indelebles. Los bolígrafos también dejarán manchas indelebles. No use cosméticos.