



Entrenador de Manejo de Vía Aérea Neonatal

Cod: 3001-0158

Acerca de este simulador

Esta cabeza de vía aérea neonatal permite la práctica de la intubación y succión endotraqueal. La anatomía incluye fosas nasales lengua nasal faringe laringe epiglotis y tráquea. La parte trasera del modelo se puede elevar hacia arriba para revelar la estructura interna.


Después de bombear aire al interior del tubo endotraqueal los pulmones se expandirán si la intubación se realiza correctamente.

Lubricación

Antes de usar el entrenador para el manejo de las vías respiratorias infantiles, lubrique tanto el tubo como las vías respiratorias con el lubricante suministrado



1. Hay dos formas de comprobar si el maniquí está incubado en la tráquea:
Levante la cabeza del maniquí y abra la parte posterior de la faringe.
También puede revisar a lo largo del orificio en la parte posterior de la cabeza para confirmar la ubicación del tubo endotraqueal

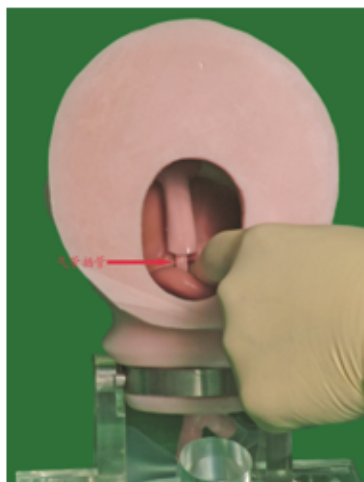

Conecte el tubo al respirador y bombee aire al tubo. Los pulmones del maniquí se expandirán si la intubación se realiza correctamente, lo que proporciona una confirmación adicional de la ubicación adecuada del tubo en la tráquea.

Limpieza de la cara:

La suciedad normal se puede eliminar de la cara del entrenador con agua jabonosa suave. Limpie con un paño suave o una toalla de papel.

Nunca coloque sobre el simulador ningún tipo de papel o plástico impreso. Estos materiales transferirán manchas indelebles.

Los bolígrafos también dejarán manchas indelebles. No utilices ningún cosmético.

Importante: Almacenamiento de su simulador

Siga estos pasos cuando coloque el simulador en el estuche para su almacenamiento o transporte.

1. Asegurándose de que la cabeza esté en el soporte de montaje,
2. Coloque el bloque de espuma en su posición sobre el cuello, justo debajo de la barbilla, de modo que el orificio redondo quede hacia arriba.